

OTICON | Real

**Gerçek seslerle
zinde kal!**



oticon
life-changing technology

10 işitme cihazı kullanıcısından 7'si rahatsız edici seslerle mücadele etmek zorunda kalıyor

Çalan telefonlar
Esen rüzgar
Klavye tıklaması
Kapı çarpması
Çarpan anahtarlar
Gıcırdayan zeminler

Düşük ya da yüksek şiddetli rahatsız edici sesler her yerde olabilir. Bunlar **gerçek dünyanın** sesleri. Birlikte, ortama zenginlik ve anlam katarlar. Ancak on işitme cihazı kullanıcısından yedisi için bu rahatsız edici sesler günlük hayatta zorlayıcı olabilir. Geleneksel işitme cihazlarının iki dezavantajı vardır. Birincisi, çok yavaş tepki verirler ve sesleri doğal olmayan bir şekilde aşırı yükseltirler. İkincisi ise konuşma sesi dahil olmak üzere ortamdaki tüm seslerin kazancını azaltan basit teknikleri kullanırlar. Sonuç olarak kullanıcılarınızın odaklanması ve sosyalleşmesi için daha fazla efor harcaması gerekir.

10

Kullanıcıdan

7'si

Rahatsız edici seslerle her gün
mücadele etmek zorunda kalıyor*

10

İşitme uzmanından

9'u

Bu zorluklarla karşılaşıyor

Gerçek dünyanın seslerini deneyimleyin

Oticon Real™, gerçek seslerle zinde kal!

Oticon Real ile Tanışın

Oticon Real, hayatın gerçek seslerini işlemek için tasarlanmış yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Polaris R™ ve RealSound Technology™ ile güçlendirilen Oticon Real, kullanıcıların anlamlı tüm seslere dengeli, olağanüstü ayrıntılı ve net bir şekilde erişmesini sağlar. Oticon Real kullanıcıların rahatsız edici seslere maruz kalmasını önleyerek daha konforlu ve daha odaklı bir işitme deneyimi sunar. Böylece kullanıcılar gün boyu zinde kalır.

Beyni olağanüstü hız ve hassasiyetle destekler

Hızlı ve hassas ses işleme teknolojisi sayesinde karmaşık ve ani sesler artık rahatsız edici değil ancak hala erişilebilir. Bu sayede, konuşmadan ve çevredeki diğer seslerden ödün verilmeden beynin gerçek ve tam ses sahnesine ulaştığından emin olunur.

Gerçek dünyanın seslerine erişim sağladığı kanıtlandı

Oticon Real ile yapılan araştırmalar, kullanıcıların gerçek dünyanın seslerine daha iyi bir konuşma netliği ve daha az dinleme eforu ile erişebileceklerini göstermiştir. Aynı zamanda, gün içindeki rahatsız edici seslerin azaltılması söz konusu olduğunda Oticon Real'in diğer işitme cihazlarından çok daha iyi bir performans göstererek kullanıcıların gerçek dünyanın sesleriyle zinde kalmasını desteklediği kanıtlanmıştır.



Gerçek Dünyanın Seslerine Erişin

Standartların ötesine geçerek, gerçek dünyanın seslerini deneyimleme imkanı sunuyoruz

Dünya zengin, karmaşık ve öngörülemez seslerle dolu. Bu sesler, çevremizde gezinmemize, etrafımızdan haberdar olmamıza, etkileşimde bulunmamıza ve gerektiğinde tepki vermemize yardımcı olur. Bunlar gerçek dünyanın sesleridir ve zinde kalmamızı sağlar.

Hayatı dolu dolu yaşamak için kullanıcıların sadece konuşma seslerine değil, tüm anlamlı seslere erişmesi gerekir. Bu nedenle 2016'dan beri standartların ötesine geçiyor ve en yeni teknolojileri sunuyoruz.

BrainHearing™ felsefemiz doğrultusunda, şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Oticon Real ile kullanıcılar rahatsız edici sesler olmadan bütün ses sahnelerine erişim imkanı bulur.

Gerçek bir ses deneyimi için standartların ötesine geçmek

- 2016** Oticon Opn™ ses sahnesini 360 derece kapsayarak birden çok konuşmacıya açıyor ve işitme sektöründe devrim yaratıyor.
- 2019** Oticon Opn S™'en iyi ses kalitesini sunan ve gün boyu ses kazancını koruyan üstün, proaktif feedback teknolojisini sunuyor.
- 2020** Oticon More™, Derin Nöral Ağa (DNN) sahip dünyanın ilk işitme cihazı, deneyimlerden öğrenebiliyor, bu da daha çok beyin gibi çalışabileceği anlamına geliyor.
- 2023** Oticon Real, BrainHearing teknolojimizi bir sonraki seviyeye taşıyor. İşitme cihazı kullanıcılarına tüm ses sahnesini sunarken, çığır açan yeniliklerle kullanıcıları rahatsız edici seslere maruz kalmasını engelliyor.



Gerçek ses Gerçek fayda

Oticon Real ailesi

Oticon Real, dört işitme cihazından oluşan bir ailedir. Kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üç performans seviyesinde ve çeşitli renk seçeneklerinde sunulur. Oticon Real ayrıca, doğrudan ses akışı, hands-free aramalar ve çok daha fazlasına olanak tanıyan son teknoloji bağlantı özelliğine sahiptir.



miniRITE R

miniRITE T

miniBTE R

miniBTE T

Evde veya hareket halindeyken şarjsız kalmayın

Oticon Real evde veya hareket halindeyken şarj imkanı sağlamak için, iki farklı şarj cihazıyla birlikte sunulur - Masa tipi şarj cihazı ve taşınabilir SmartCharger.



Neden Oticon Real'ı tercih etmelisiniz?



RealSound Technology™

Oticon'un ses işleme alanındaki en son teknolojisini deneyimleyin



Yeni Polaris R platformu

Yeni dedektörler ve yerleşik bir Derin Nöral Ağ (DNN) ile bugüne kadarki en güçlü platformumuz



Gerçek hayatın faydalarını sağladığı kanıtlandı

Dinleme eforunu azaltarak beyni destekliyor ve daha iyi konuşma netliği sağlar



Kolay ve zahmetsiz bağlantı

Şimdi hands-free arama yapabilirsiniz



Mükemmel şarj edilebilirlik

Evde veya hareket halindeyken, gün boyu güç sağlar*


Oticon Real gerçek ses deneyimi

Derin Nöral Ağ (DNN) tabanlı ses işleme teknolojimizi bir sonraki seviyeye taşıyoruz.

RealSound Technology™, kullanıcıların gerçek dünyada zinde kalmalarına yardımcı olur
Oticon Real'daki RealSound Technology™, rahatsız edici seslerin hızlı ve hassas bir şekilde işlenmesi için yeni dedektörler içeren Polaris R platformu ile güçlendirilmiştir. Bu, tüm ses ayrıntılarının otomatik ve hassas bir şekilde işlenmesini sağlar ve kullanıcılara optimum ses performansı sunar. Polaris R platformu ayrıca, 12 milyon gerçek

hayattan ses sahnesi ile programlanmış yerleşik bir Derin Nöral Ağ (DNN) içerir. Bu sayede Oticon Real, farklı dinleme ortamlarında bile mükemmel biçimde çalışarak sesleri daha ayırt edici hale getirir. Şimdi, SuddenSound Stabilizer ve Wind & Handling Stabilizer özelliklerinin de dahil edilmesiyle Oticon Real, DNN tabanlı ses işleme teknolojimizi bir sonraki seviyeye taşıyor.

RealSound Technology™

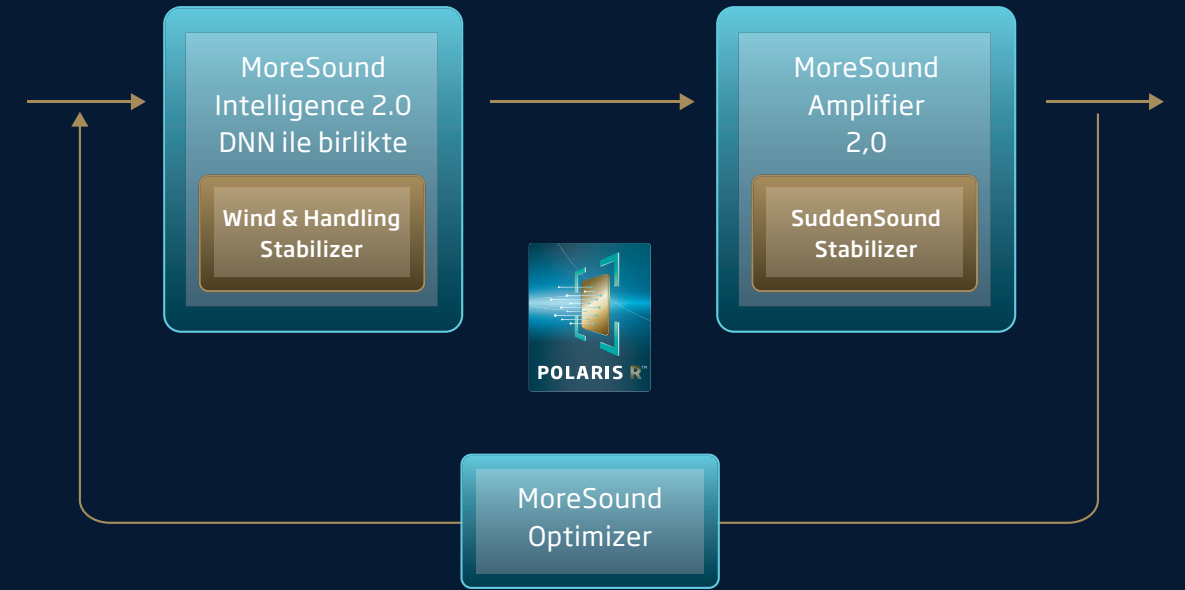

MoreSound Intelligence™ 2.0

MoreSound Intelligence 2.0 ses girişini netleştirir, Konuşma ve gürültü arasındaki farkı dengeleyerek tüm ses sahnesine erişim sağlar. Wind & Handling Stabilizer çift patentli teknolojisi ile rüzgar ve temas gürültüsünü anında algılar ve önler.

MoreSound Amplifier™ 2.0

MoreSound Intelligence 2.0'dan optimum ses girişi alan MoreSound Amplifier 2.0, tüm anlamlı seslerin hassas ve dengeli bir şekilde yükseltilmesini sağlar. Şimdi, SuddenSound Stabilizer'ın da dahil edilmesiyle, düşük veya yüksek şiddetli ani sesler anında algılanır ve kontrol edilir. Böylece kullanıcılar rahatsızlık

hissetmeden tüm sesleri duyabilir. Ayrıca SuddenSound Stabilizer kullanıcıların bireysel ihtiyaçları için Oticon Genie 2 ile kişiselleştirilebilir.

MoreSound Optimizer™

MoreSound Optimizer feedback meydana gelmeden algılar ve proaktif olarak önler. Bu, işitme cihazının feedback'i önlemesini ve tüm gün boyunca optimum kazanç sağlamasını mümkün kılar. Ayrıca en zorlu dinleme ortamlarında bile daha doğal ses, daha fazla konfor ve konuşmayı daha iyi anlamayı sağlar. Böylece kullanıcılar daha gelişmiş bir şekilde konuşmanın ayrıntılarına erişebilir.

Yeni bir araştırma, DNN tabanlı ses işleme teknolojisinin olağanüstü performansını kanıtlıyor

DNN tabanlı işleme teknolojimizi gerçek hayatta geleneksel bir gürültü işleme algoritmasına karşı test ettik. Bulgular dikkat çekiciydi. Katılımcıların günlük yaşamlarından alınan 3.600'den fazla değerlendirmede, ses ortamı daha zorlu hale geldiğinde geleneksel teknoloji

ile test edilen kullanıcılarda memnuniyet düştü. Ancak DNN tabanlı işitme cihazları kullanıldığında, farklı ortamlarda memnuniyet hep aynı yüksek seviyede kaldı.* Bu, DNN teknolojimizin günlük hayatın değişen dinleme ortamlarına hızlı, hassas ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlama konusundaki benzersiz yeteneğini kanıtıyor.

* Christensen, J., Whiston, H., Lough, M., Gil-Carvajal, J., Rumley, J., & Saunders, G. (2022). Real-life benefits of Deep Neural Network-based noise reduction in hearing aids. Manuscript in preparation

Ani Sesleri Hızlı ve Hassas Dengeleme

Rahatsız edici, ani sesler günlük hayatın her yerindedir ve her gün binlerce kez meydana gelir. Bu sesler, kapı çarpması gibi yüksek seslerden klavyeye tıklaması gibi yumuşak seslere kadar çeşitli olabilir. Bunlar çok hızlı başlayıp sona eren ani seslerdir ve diğer ses türlerine kıyasla çok farklı bir işlem gerektirir. İşitme cihazının görevi, bu sesleri rahatsız edici olmadan beyne iletmektir. Kullanıcılar, sürüş odağını kaybetmeden araçlarındaki dönüş sinyalinin sesini duymak veya akşam yemeğindeki misafirleriyle sohbetlerini bölmeden çevre seslerini de duymak isterler.


Geleneksel işitme cihazı teknolojileri, sesi çok fazla yükseltir ya da bu rahatsız edici sesleri engellemek için hassas olmayan bir şekilde tüm seslerdeki kazanç azaltır. Bu özellikler, kullanıcıda işitme sırasında rahatsızlığa sebep olur veya konuşma sesi dahil diğer önemli seslere erişimi engeller. Ancak Oticon Real, SuddenSound Stabilizer ile günde 500.000'den fazla ani sesi işleyebilir. Böylece kullanıcılar işitme konforlarından ve sese erişimlerinden taviz vermeden etraflarında olup biten her şeyin daha çok farkında olur.

SuddenSound Stabilizer günde

500.000

'den fazla ani sesi işleyebilir

SuddenSound Stabilizer etkinliği

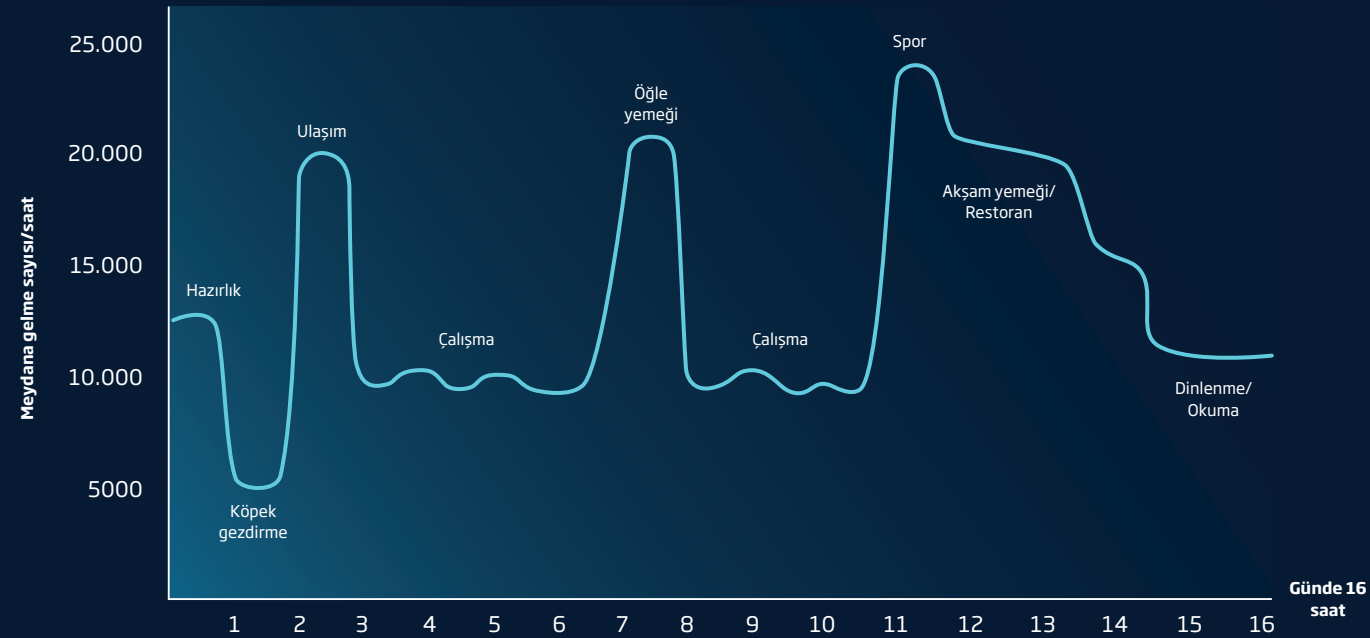

SuddenSound Stabilizer, hem düşük şiddetteki hem de yüksek şiddetteki ani sesleri tanımlayabilir ve dengeleyebilir

Yeni dedektörlerle güçlendirilen SuddenSound Stabilizer, çevredeki sesleri mükemmel bir şekilde algılar. Kullanıcıya konforlu bir işitme deneyimi yaşatmak için düşük şiddetteki sesleri ve ani gürültüleri dengeler.

Konuşma sesini koruyacak kadar hızlı ve hassas
Geleneksel işitme cihazı teknolojileri, sesi çok fazla yükseltir ya da hassas olmayan bir şekilde kazanç

azaltır. Bu özellikler, kullanıcıda işitme sırasında rahatsızlığa sebep olur veya konuşma sesi dahil diğer önemli seslere ulaşımı engeller. SuddenSound Stabilizer, ani bir sesin ne zaman meydana geldiğini anlık olarak algılayarak hızlı ve hassas bir şekilde sese müdahale edecektir. Bu da kullanıcılar çevrelerindeki tüm seslere erişmeye devam ederken konuşmalara daha iyi odaklanmalarını ve günlük hayatta zinde kalmalarını sağlayacaktır.



Ani ses


- Ani seslerde hassas olmayan kazanç azaltımı
- Konuşma sesini azaltma ve maskeleye

Ani ses

- Ani seslerde hassas kazanç azaltımı
- Maskeleye etkisi olmadan, konuşma sesinde optimum ses yükseltme

Dinleme eforunu önemli ölçüde azalttığı kanıtlandı

SuddenSound Stabilizer dinleme eforunu %22'ye kadar azaltır*, konuşma anlaşılabilirliğini korur ve kullanıcıların etkileşimde kalmalarına yardımcı olur.

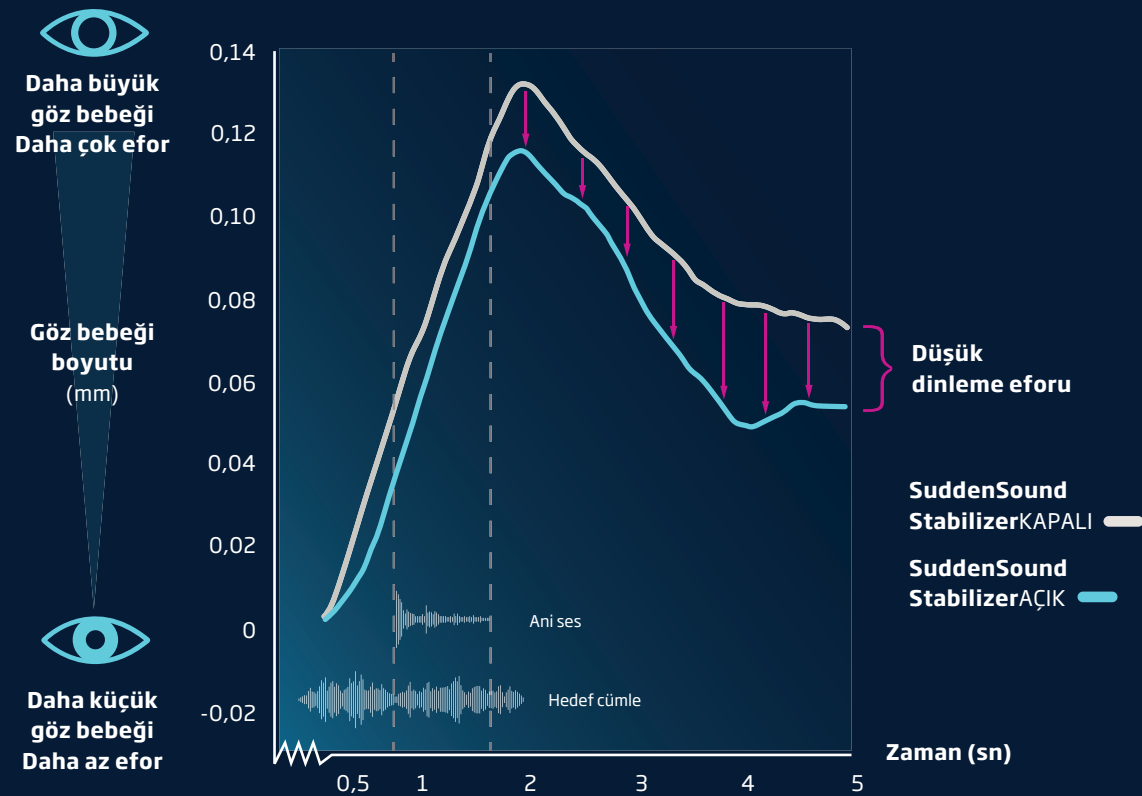

SuddenSound Stabilizer'ı klinik bir pupilometri (göz bebeği) araştırması ile test ettik. Bu çalışmada, katılımcılara ani seslerle kesintiye uğrayan bir dizi cümle sunuldu. Tipik olarak, gürültülü bir ortamda konuşma sesini dinlemek gibi zorlu bir görevi yerine getirirken, efordaki artış, göz bebeği büyümesindeki artış olarak yansır.


Sonuçlar, SuddenSound Stabilizer etkilene dinleme için daha az efor harcadığını göstermiştir. Ayrıca, konuşmayı

anlama üzerinde herhangi bir etki olmaması, SuddenSound Stabilizer'ın, kullanıcıların ani seslere maruz kalmasını önlerken bile konuşmaların bozulmadığını göstermektedir.**

İşitme cihazı kullanıcıları, dinleme ortamı zorlu olduğunda bile konuşmaya katılabilirliklerini bildirdiler. Bu, ani sesler kullanıcıya daha dengeli bir şekilde sunulduğunda, zinde olmaları ve katılım sağlamaları için daha az çaba gerektiğini göstermektedir.

Oticon Real, ani sesler ortaya çıktığında konuşma netliğini artırır

Oticon Real, yapılan teknik çalışmada ortamda ani sesler ortaya çıktığında daha iyi konuşma ağırlıklı Sinyal Gürültü Oranı (SNR) değerleri ile Oticon More'un da üzerinde performans sergiledi. Bu sayede, dinleme ortamı zorlu olduğunda bile gelişmiş konuşma netliği sağladı. Ek olarak, Oticon Real, Oticon More'un önceki teknolojisine kıyasla kullanıcılar için %70 daha fazla ani sesi yakalama ve doğru bir şekilde işleme performansı gösterdi.**

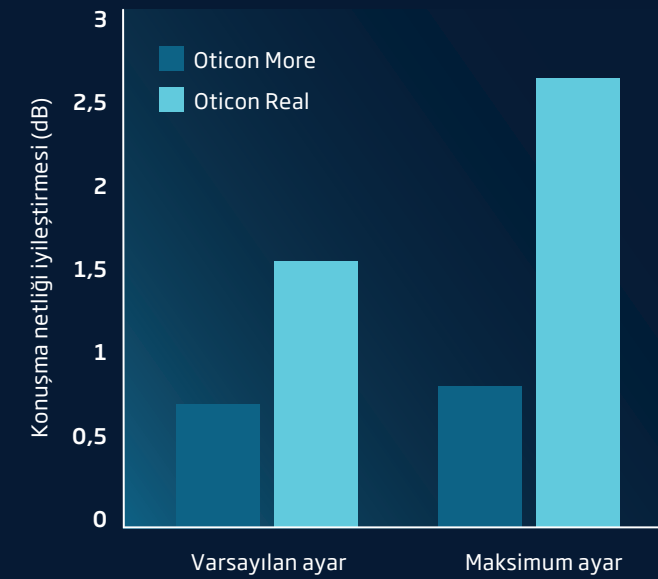

SuddenSound Stabilizer tüm kişisel tercihlere hitap eder

SuddenSound Stabilizer, Oticon Genie 2'deki altı adet ayar ile özelleştirilebilir. Ani seslere karşı hassasiyeti olan ve bununla birlikte görülen hiperakuzi, kulak çınlaması veya diğer ses hassasiyetleri gibi durumlar için iyi bir uygulama seçeneği sunar. Böylece ani seslerin işlenmesi hassas bir şekilde optimize edilebilir.



Wind & Handling Stabilizer

Dünyanın ilk rüzgar ve temas gürültüsü önleme özelliği

Rüzgar ve temas gürültüsünü azaltır, rüzgarlı ortamlarda bile konuşmaya erişimi iyileştirir.

İşitme cihazı kullanıcısı, ister kumsalda zaman geçiriyor, ister koşuyor, çocukları veya torunlarıyla dışarıda oynuyor olsun; rüzgar işitme cihazlarında rahatsız edici durumlara ve hoş olmayan seslere neden olacaktır. El, saç, gözlük veya yüz maskesi, rüzgarın işitme cihazları üzerinden geçerken çıkardığı istenmeyen ses ile aynı sesi oluşturur. Ancak Oticon Real, kullanıcıları rahatsız edici rüzgar ve temas gürültüsüne maruz kalmalarını önleyerek, gerçek dünyada zinde kalmalarını sağlıyor.

Konuşmaya daha iyi erişim ile daha rahat bir dinleme deneyimi

Geleneksel işitme cihazları, rüzgar ve temas gürültüsünün her iki mikrofona da tam güçte girmesine izin verir. Bu, gürültü azaltma sistemine ekstra baskı uygulayarak daha geniş bantlarda gürültüye müdahale edilmesine; dolayısıyla gürültü işleme verimliliğinin azalmasına sebep olur. Sonuç olarak, çok fazla rahatsız edici rüzgar ve temas gürültüsünün yanısıra net konuşma sesine erişimin azalmasına da neden olur.

Çift patentli teknolojiye sahip Oticon Real'deki Wind & Handling Stabilizer, rüzgar ve temas gürültüsünü **sanıyede 500 defa** algılar ve temizler. Ses girişi en temiz olan mikrofona seçerek rahatsız edici sesin sisteme girmesini engeller. Ardından, diğer mikrofondan gelen rüzgar ve temas gürültüsünü verimli bir şekilde ve yalnızca gürültüden etkilenen frekanslarda azaltır.

Bu özellik, MoreSound Intelligence 2.0'da ileri işleme için daha temiz bir ses sağlayarak, işitme cihazı kullanıcılarının rüzgarlı ortamlarda konuşma sesine daha iyi erişmesine yardımcı olur.*



Wind & Handling Stabilizer, kullanıcıları hem rüzgar hem de temas gürültüsünden korumak için çalışır. Burada rüzgar örneğini kullanıyoruz.

* Gade et al. (2023). -Wind and Handling Stabilizer -Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.

Oticon Real rüzgar ve temas gürültüsü yönetiminde üstün performans gösteriyor

İşitme Cihazı testlerimizi bir sonraki seviyeye taşıyoruz

Oticon Real'i mümkün olan en zorlu ve en kontrollü ortamda test etmek için, saatte 378 km'ye varan hızda rüzgar üretebilen, en büyük rüzgar tünellerinden birini kullandık. Tünelin akustik altyapısı da türbin kanatlarından gelen gürültüyü önleyecek şekilde inşa edildi, böylece doğru verileri toplamak için yüksek tekrarlanabilirlik ile tutarlılıkta testler gerçekleştirdik.



Rüzgar sesini azaltmada ve daha iyi konuşma netliği sağlamada olağanüstü performans

İşitme cihazı kullananlar için rüzgarlı bir günde yürürken konuşulanları anlamak zor olabilir. Böyle bir durumda işitme cihazlarınızdan, arkadaşınızı anlayabilmenizi sağlamasını ve sizi rüzgar sesinin rahatsız ediciliğinden korumasını beklersiniz.

Yapılan klinik araştırmada, işitme cihazı kullanıcıları gözleri bağlı bir şekilde Oticon Real'i ve önde gelen iki rakip işitme cihazını 6 m/s'lik orta şiddetteki rüzgar hızlarında karşılaştırdılar. Bu araştırmanın sonuçları,

Oticon Real'in Gürültü Şiddeti konusunda Rakip 1'i ve Konuşma Netliği konusunda Rakip 2'yi açık ara geride bırakarak her iki sorunun çözümünde de daha yüksek başarı gösterdi.**

Ek olarak Oticon Real ile yapılan ölçümler hafif rüzgardan şiddetli rüzgara kadar değişen koşullarda ortaya çıkan 25 dB'ye kadarki rüzgar gürültüsüne işitilebilir tüm frekanslarda müdahale ederek bu etkiyi azaltabildiğini göstermiştir.***

	Rüzgar gürültüsü şiddeti	Rüzgarda sesin netliği
Oticon Real	✓	✓
Rakip 1	22% Daha gürültülü** X	✓
Rakip 2	✓	17% Daha az net** X
	✓ İyi performans	X Oticon Real daha iyi performans gösterdi

Oticon Real, temas gürültüsünü azaltmada rakiplerini açık ara geride bırakıyor

Bir işitme cihazı kullanıcısı için temas gürültüsü ve rüzgar sesi aynı derecede rahatsız edicidir. Bir klinik çalışmada işitme cihazlarının mikrofonlarına parmak ile temas edilerek Oticon Real'in Wind & Handling Stabilizer özelliği en iyi iki rakibine karşı test edildi.

Sonuçlar, Oticon Real'deki temas gürültüsünün Rakip 1'den **14 dB**, rakip 2'den ise **19 dB** daha düşük olduğunu gösterdi.** Bu sonuç Wind & Handling Stabilizer özelliğinin büyük bir fark yarattığını ortaya koydu.



* The Poul la Cour Tunnel
** Gade et al. (2023). -Wind and Handling Stabilizer -Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.
*** Etki boyutu rüzgar durumuna bağlıdır

Gerçek dünya bağlantıda kalmaktır

Ses akışı, hands-free ve çok daha fazlası

- Bluetooth® Low Energy teknolojisine sahiptir ve kapsamlı bir bağlantı seçeneği sunar
- Oticon Real Made for iPhone bir işitme cihazı olarak, iPhone ve iPad'de* hands-free arama olanağı sunar. Bununla beraber iPhone, iPad ve iPod touch'tan doğrudan ses akışı sağlar.
- Oticon Real, Android Protocol for Audio Streaming (ASHA) ile de uyumludur; bu, kullanıcılarınızın Android™ cihazlarından doğrudan ses akışı yapabilmelerini sağlar.**

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

Geniş Bağlantı Seçenekleri



ConnectClip

ConnectClip'i uzaktan mikrofon veya uzaktan kumanda olarak, işitme cihazlarınızı kablosuz kulaklık gibi kullanabilirsiniz. ConnectClip akıllı cihazlardan ses akışı sağlar, böylece hands-free özelliğın keyfini çıkarabilirsiniz.




TV Adapter

TV Adaptörünüzü kullanarak, Oticon Real işitme cihazlarınıza TV'den gelen sesleri aktarabilirsiniz.



Remote Control

Ses seviyesini ayarlayın, program değiştirin, işitme cihazlarınızın sesini kapatın.

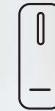

EduMic

EduMic' i uzaktan mikrofon olarak kullanın veya bilgisayar, tablet ve daha fazla cihazdan doğrudan ses aktarın.

Kolay, hands-free aramalar

Oticon Real Made for iPhone özellikli olduğu için, kullanıcılarınız artık her zamankinden daha kolay bağlanabilir. Oticon Real, ConnectClip gibi bir yardımcı cihaza ihtiyaç duymadan iPhone veya iPad'de hands-free arama yapmalarını sağlar. Bu, kolaylıkla hands-free arama yapabilecekleri ve ellerini kullanmaları gereken diğer işlerine odaklanabilecekleri anlamına gelir.




Made for
iPhone | iPad

* Hands-free iletişim, iOS 15.2 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone 11 ve iPadOS 15.2 veya üzeri işletim sistemine sahip iPad için geçerlidir

Oticon Companion App hepsi bir arada çözüm

Oticon Companion App, kullanıcılarınıza işitme cihazlarını kolayca kontrol etmeleri ve kişiselleştirmeleri, kaybolma durumunda işitme cihazlarını bulmaları, bağlı cihazlarını yönetmeleri ve ihtiyaç duyduklarında sizden uzaktan danışmanlık almaları için ihtiyaç duydukları desteği veren yeni, hepsi bir arada çözümdür. Oticon ON ve Oticon RemoteCare'in yerini alan Oticon Companion, gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve gelecekte birçok heyecan verici özelliği de bünyesinde barındırıyor.

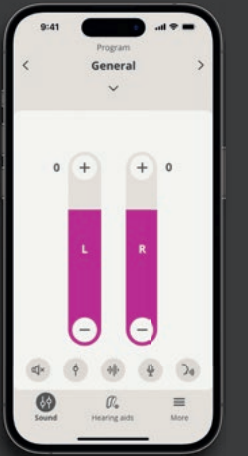

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. App Store, Apple Inc.'in hizmet markasıdır. Android, Google Play ve Google Play logosu Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Gerçek dünya için tasarlandı

Oticon Real aralarından seçim yapabileceğiniz dört farklı model, dokuz farklı renk ve üç performans seviyesinde sunulur ve ayrıca iki farklı şarj cihazı vardır.



SmartCharger



Masa tipi şarj cihazı



miniRITE R




miniRITE T



miniBTE R



miniBTE T

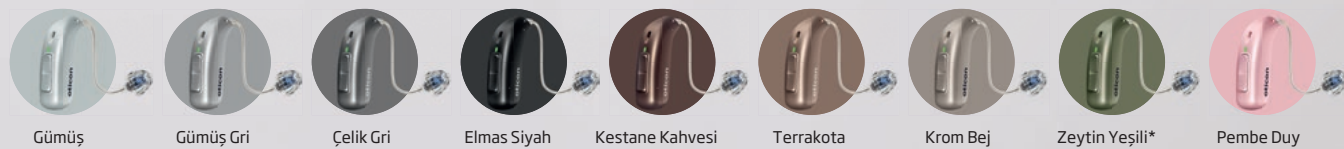

Gümüş

Gümüş Gri

Çelik Gri

Elmas Siyah

Kestane Kahvesi

Terrakota

Krom Bej

YENİ
Zeytin Yeşili*

Pembe Duy

Gücünü devrim yaratan özelliklerden alıyor



MoreSound Intelligence™ 2.0
Net, eksiksiz ve dengeli bir ses sahnesinde tüm anlamlı seslere erişin
Şimdi Wind & Handling Stabilizer ile birlikte



Wind & Handling Stabilizer
Rüzgarlı ortamlarda konuşmaya daha iyi erişim



MoreSound Amplifier™ 2.0
Ses sahnesindeki değişiklikleri takip eden hızlı, yüksek çözünürlüklü amplifikasyon
Şimdi SuddenSound Stabilizer ile birlikte



SuddenSound Stabilizer
Hem düşük hem de yüksek şiddetli ani seslerde dengeli amplifikasyon



MoreSound Optimizer™
Feedback riski olmadan, gün boyu ideal kazanç



Sanal Dış Kulak
Daha iyi uzamsal denge sağlamak için üç gerçekçi kulak kepçesi modeli



Ses Güçlendirici
Karmaşık ortamlarda belirlenen, konuşma sesi için öncelikli dinamik kazanç



Spatial Sound™
En çok ilgi duyulan seslerin yerinin tespit edilebilmesini iyileştirir



Speech Rescue™
Yüksek frekanslı sesi daha işitilebilir kılar



Hafif Konuşma Yükseltici
Ses seviyesini yükseltmeden, düşük şiddetli seslerin anlaşılabilirliğini artırır



Temiz Dinamikler
Gürültülü ortamlarda daha az bozulma ile daha iyi ses kalitesi




Tinnitus SoundSupport™
Tinnitus hastaları için rahatlatıcı sesler




Geniş bir işitme kaybı aralığını kapsar

miniRITE


60

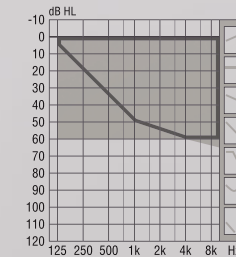


85

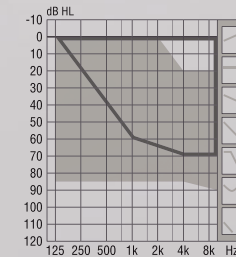

100

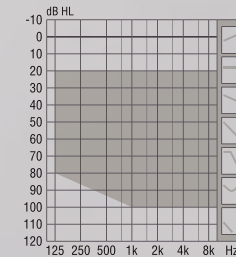

105

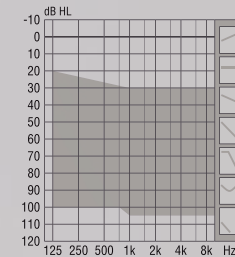

Kalip, Bas ve Power kubbe


OpenBass kubbe

Power flex kalıp, Bas ve Power kubbe

Power flex kalıp

miniBTE

85

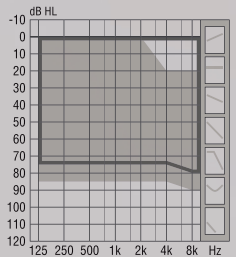

Boynuz

Corda miniFit (ince hortum)

life-changing
technology

S-419510TR / 2023.04.03 / v1

www.oticon.com.tr

Oticon is part of the Demant Group.

oticon
life-changing **technology**